

TECLADO COMUNIQUE

Teclado de tela para auxílio da comunicação escrita

Autora: **Miryam Pelosi**

TECLADO COMUNIQUE - versão 1.0

O Teclado Comunique foi desenvolvido pela terapeuta ocupacional Miryam Pelosi para auxiliar a escrita de pessoas com dificuldades motoras. Suas teclas reproduzem as teclas do teclado convencional com recursos auxiliares como a abreviatura associada a letras do teclado e um dicionário que auxilia a predição de palavras.

Como instalar o Teclado Comunique:

Unzip o programa clicando 2 vezes no arquivo “Teclado Comunique.zip”
Instale o programa clicando 2 vezes no arquivo “teclado”

Para abrir o programa:

Aperte INICIAR
Escolha PROGRAMAS e depois escolha a opção TECLADO
Aperte 2 vezes para rodar o programa

Para iniciar o uso de Teclado Comunique:

1. Escolha OPÇÕES
2. Ajuste o TEMPO DE ANDAR que é a velocidade da varredura e o TEMPO DE SELECIONAR que é o intervalo entre os acionamentos
3. Escolha o tipo de acesso: escaneamento ou joystick
4. Quando escolher JOYSTICK faça ao mesmo tempo:
 - No Joystick - calibre o joystick levando o manete ou apertando a seta do joystick para cima
 - No software - aperte a seta para cima da opção CONFIGURAÇÃO DO JS com o mouse

Repetir o mesmo procedimento para os movimentos para baixo e para os lados esquerdo e direito.

5. Abra o programa que vai ser usado com o Teclado Comunique
6. Diminua sua tela mantendo a janela do programa escolhido acima da janela do Teclado Comunique

Distribuído gratuitamente pelo Centro de Terapia Ocupacional do Rio de Janeiro

Av. das Américas, 700 BL 1 Grupo 108 – Città América / Barra da Tijuca – Rio de Janeiro– RJ


Tel: (21) 2132-7890 – e-mail: miryam.pelosi@globo.com

TECLADO COMUNIQUE

Teclado de tela para auxílio da comunicação escrita

Autora: **Miryam Pelosi**

Ex: Teclado Comunique + Word

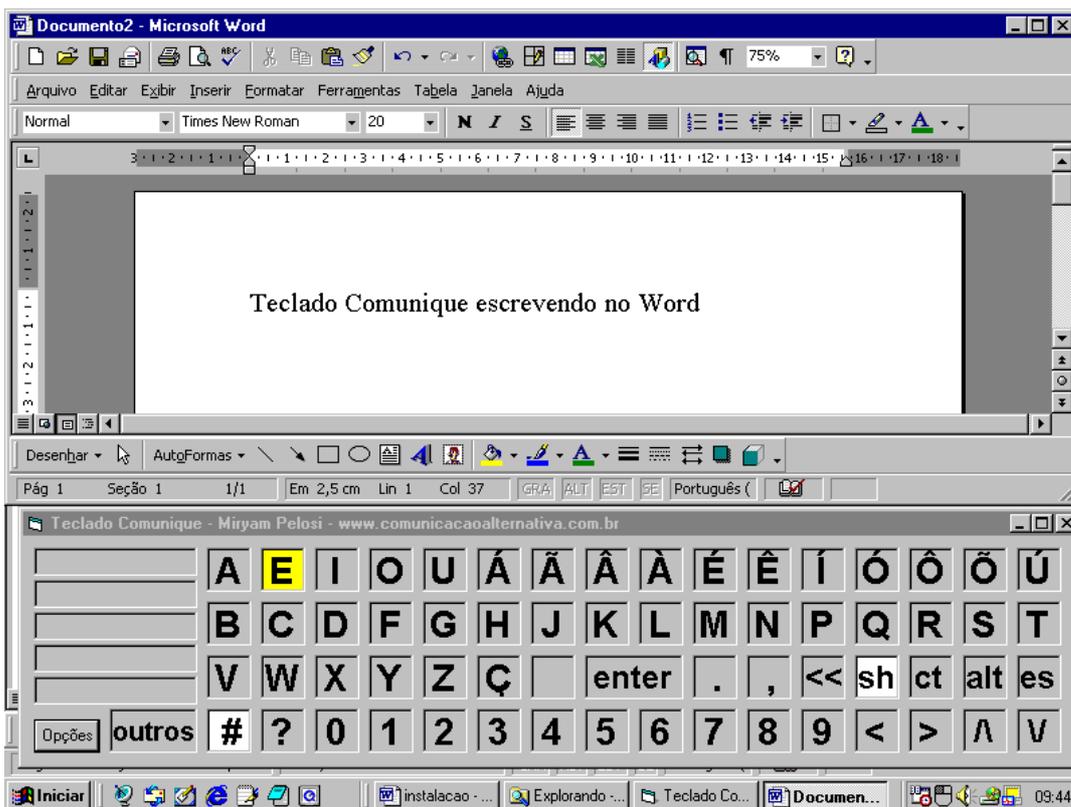

Recursos do Teclado Comunique

Predição de palavras inseridas no dicionário

1. Aperte OPÇÕES
2. Escolha INCLUIR
3. Escreva a palavra e aperte OK
4. Quando uma letra é escolhida pelo usuário as palavras que começam com aquela letra aparecem na lateral esquerda da tela. Quando escolhida a palavra, esta é inserida no texto.

Abreviaturas associadas às teclas do Teclado Comunique

Aperte OPÇÕES

Distribuído gratuitamente pelo Centro de Terapia Ocupacional do Rio de Janeiro

Av. das Américas, 700 BL 1 Grupo 108 – Città América / Barra da Tijuca – Rio de Janeiro– RJ

Tel: (21) 2132-7890 – e-mail: miryam.pelosi@globo.com

TECLADO COMUNIQUE

Teclado de tela para auxílio da comunicação escrita

Autora: **Miryam Pelosi**

Escolha a letra na qual a abreviatura será associada clicando com o mouse

Aperte ALTERAR e insira o texto

De OK

Para usar as abreviaturas durante a escrita aperte **#** e a letra na qual a abreviatura foi associada. O texto será inserido automaticamente.

Dica: Para auxiliar o uso das abreviaturas faça uma lista e cole ao lado do computador.



Dica: Para que o Teclado Comunique funcione adequadamente click na barra de tarefas do programa que está sendo utilizado com o teclado.